

Instant teeth whitening kit

PRODUCTOMSCHRIJVING

iWhite Instant is een product voor het verkrijgen van wittere tanden met onmiddellijk resultaat. Het is gemakkelijk in gebruik en veilig voor het gebit.

Deze behandeling kunt u thuis uitvoeren en duurt slechts 20 minuten per keer en geeft u onmiddellijk tot 8 tinten wittere tanden. Voor een nog sprankelender resultaat kunt u het product gedurende 5 opeenvolgende dagen gebruiken of u gebruikt het af en toe wanneer u vindt dat het nodig is.

De flexibele gebitsvormen passen in ieder gebit en zijn gevuld met een actieve gel en hygiënisch verpakt. Eén verpakking bevat 10 gevulde gebitsvormen. Deze mondstukken zijn onmiddellijk klaar voor gebruik. Plaats één mondstuk op de bovenste tandenboog en één op de onderste tandenboog.

iWhite Instant onderscheidt zich van alle andere tandbleekmiddelen omdat:

- Het zorgt voor een **ONMIDDELIJK RESULTAAT** en het **VERWIJDERT ACTIEF VLEKKEN** op de tanden dankzij de unieke Film-Gekristalliseerde-Calcium technologie. Dit innovatieve één-stap whitening systeem zorgt voor een onmiddellijk en natuurlijk effect, tot wel 8 tinten wittere tanden.
- Het levert een goed oplosbare bron van Calcium en maakt de tanden daardoor **STERKER**.
- Het is een **ÉÉN-STAP-MECHANISME**: het is niet nodig om mondstukken te koken of schoon te maken, geen rommel met spuiten, borsteltjes of afmeten van gel.
- Het mondstuk is ontworpen om zowel de voor- als de achterzijde van de tanden witter te maken. Dit is belangrijk omdat tanden doorschijnend zijn en vlekken op de achterzijde van de tand aan de voorzijde kunnen doorschijnen.
- Het is gemakkelijk in gebruik: de mondstukken passen bij iedereen en zijn zacht en flexibel.
- Je hoeft zelf **NIET** te MIXEN. Elk mondstuk is gevuld met de juiste hoeveelheid actieve whitening gel die speciaal ontwikkeld werd om gevoeligheid te voorkomen.
- Klinische testen bewijzen de **VEILIGHEID** en **DOELTREFFENDHEID** van iWhite Instant.

AANGEWEZEN BIJ

iWhite Instant wordt gebruikt in geval van:

- Verkleuring van de tanden, de toename van tandplak (tandsteen controle), aanslag door roken, de inname van bepaalde voedingsstoffen of dranken (bijv. rode wijn, koffie etc.)
- Verkleuring van het tandglazuur waar de tanden beschadigd zijn (bijv. als gevolg van mechanische ontcleuringstechnieken).

GEBRUIKSAANWIJZING



1. Poets voorzichtig uw tanden voor iedere behandeling.



2. Zorg ervoor dat uw handen schoon en droog zijn.



3. Haal het gevulde mondstuk uit de gesloten verpakking en plaats deze meteen in de mond. Zorg ervoor dat de gel in contact is met het tandoppervlak. Boven- en ondertanden kunnen tegelijkertijd gebleekt worden.



4. Plaats uw lippen over het mondstuk en sluit voorzichtig uw mond. Let op: te hard bijten kan ervoor zorgen dat de gel uit het mondstuk wordt gedrukt en niet meer in contact is met de tanden.



5. Verwijder het mondstuk na 20 minuten en gooi weg. Spoel voorzichtig de resterende gel van uw tanden en tandvlees met wat water.



VOORZORGSMAATREGELEN BIJ GEBRUIK VAN IWHITE INSTANT

- Buiten bereik van kinderen houden.
- Niet gebruiken bij zwangerschap of indien u borstvoeding geeft.
- Niet geschikt voor kinderen onder de 14 jaar.
- Vermijd het inslikken van de gel.
- Enkel natuurlijke tanden worden witter. Dit product heeft geen invloed op vullingen, kronen en facetten.
- Gebruik iWhite Instant niet wanneer u een beugel, tandjuwelen en/of piercings draagt.
- Gebruik dit product niet bij problemen met het tandvlees. Stop met de behandeling indien u pijn of overgevoeligheid ervaart; neem indien nodig contact op met uw apotheker.
- Gebruik dit product niet binnen de eerste 2 weken nadat u een tandheelkundige en/of orthodontische behandeling heeft gehad (vullingen, kronen, implantaten...)
- Ga niet liggen tijdens de behandeling.
- Gebruik het product niet indien u allergisch bent voor één van de ingrediënten.
- Vermijd langdurig contact met de huid.
- Grondig spoelen indien het product in contact komt met de ogen.
- Vermijd dat het product op kleding terechtkomt.
- Een gevuld mondstuk is slechts voor éénmalig gebruik. Gebruik geen mondstukken waarvan de individuele verpakking beschadigd is.
- Het product binnen de 30 minuten gebruiken, eens de individuele verpakking geopend is.
- Voor een optimaal resultaat, raden wij u aan om tijdens de behandeling de consumptie van zuurhoudende voedingsmiddelen en dranken zoals limonade, cola etc. alsook tabak, koffie, rode wijn, fruitsap en andere te vermijden.
- We raden u aan om uw tandarts om de 6 maanden te bezoeken voor een gezonde mondhygiëne.
- Bewaar op een koele, droge plaats tussen de 2°C en 25°C. Vermijd blootstelling aan direct zonlicht en hoge temperaturen.
- Gebruik het product niet na de vervaldatum op de verpakking.

OVERIGE INFORMATIE

Fabrikant

Sylphar nv

Xavier De Cocklaan 42, B-9831 Deurle

België

Tel +32 9 321 70 80 - Fax +32 9 321 70 90

www.iwhiteinstant.com

Distributeur

Patch pharma NV

Avenue Reine Astrid 1

1440 Woutersbrakel

België

Ingrediënten (INCI): Aqua, Hydrated Silica, Glycerin, Sorbitol, Chondrus Crispus Powder, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Phthalimidoperoxycaproic Acid, Aroma, Citric Acid, Methylparaben, Acrylates/Acrylamide Copolymer, Paraffinum Liquidum, Xylitol, Monosodium Citrate, Xanthan Gum, PVM/MA Copolymer, Calcium Lactate, Calcium Gluconate, Potassium Acesulfame, Polysorbate 85, BHT, C12-15 Pareth-3.

Inhoud:

10 x 0,8 gr

DESCRIPTION D'IWHITE INSTANT

iWhite Instant est un produit de blanchiment dentaire facile à utiliser, pour une sécurité garantie et une efficacité instantanée.

Ce traitement à domicile s'applique seulement 20 minutes par jour pour un résultat instantané et des dents jusqu'à 8 teintes plus blanches. Le produit peut être utilisé pendant 5 jours consécutifs pour des résultats encore plus remarquables ou vous pouvez l'utiliser de temps en temps, à chaque fois que vous le jugez nécessaire.

Les gouttières pré-remplies s'adaptent à toute dentition et sont emballées individuellement. Une boîte contient 10 gouttières pré-remplies, prêtes à l'emploi. Portez une gouttière sur vos dents supérieures et une sur vos dents inférieures.

iWhite Instant est différent de tous les autres produits de blanchiment dentaire car :

- Il **BLANCHIT** les dents **INSTANTANÉMENT** et **ENLEVE** activement les **TACHES** : grâce à sa formule unique 'Film-crystallized technology', ce one-step système innovateur assure une blancheur naturelle en un instant, jusqu'à 8 teintes plus blanches.
- Il fournit une source très soluble de Calcium et donc **RENFORCE** vos dents.
- C'est un **SYSTÈME ONE-STEP** : il n'est donc pas nécessaire de nettoyer ou de faire bouillir les gouttières, ni de se salir avec des seringues, brosses ou gels.
- La gouttière est conçue pour **BLANCHIR LES DENTS A L'AVANT ET A L'ARRIÈRE**. C'est important parce que les dents sont translucides et des taches à l'arrière peuvent transparaître devant.
- C'est **FACILE A L'EMPLOI** : les gouttières souple s'adaptent à votre dentition.
- Il ne faut **PAS MÉLANGER**, chaque gouttière est pré-remplie avec une juste dose de gel actif, pour éviter toute sensibilité.
- **SÉCURITÉ** et **EFFICACITÉ** cliniquement prouvés.

INDICATIONS

Les gouttières iWhite Instant sont des produits à utiliser en cas de :

- Décoloration des dents, accumulation de plaque (contrôle tartre), tabagisme, consommation de nourriture et boissons (p.ex. vin rouge, café etc.)
- Décoloration de l'émail dans le cas où la dent a été abimée, p.ex. à cause de techniques de décoloration.

INSTRUCTIONS D'USAGE


1. Brossez vos dents en douceur avant chaque traitement.



2. Assurez-vous d'avoir les mains propres et sèches.



3. Enlevez la gouttière pré-remplie de son emballage et placez immédiatement la gouttière dans votre bouche en vous assurant que le gel soit en contact avec les dents. Les dents supérieures et inférieures peuvent être blanchies en même temps.

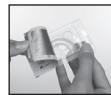

4. Fermez doucement la bouche, en recouvrant les gouttières avec vos lèvres. Attention : mordre trop fort peut causer des excès de gel qui s'échappent hors de la gouttière, à l'écart de vos dents.



5. Enlevez la gouttière après 20 minutes et jetez-la immédiatement. Rincez doucement les restes de gel sur vos dents et gencives avec de l'eau.



PRECAUTIONS D'EMPLOI D'IWHITE INSTANT

- Conserver hors de portée des enfants.
- N'est pas recommandé aux femmes enceintes ou qui allaitent.
- N'est pas recommandé pour les enfants de moins de 14 ans.
- Eviter d'avaler le gel.
- Blanchit uniquement les dents naturelles. Plombages, couronnes et facettes ne seront pas affectés par le produit.
- Ne pas utiliser iWhite Instant avec un appareil dentaire, bijoux dentaire et /ou piercings oraux.
- Ne pas utiliser ce produit en cas de problèmes de gencive. Arrêtez le traitement si vous ressentez de la douleur ou une sensibilité excessive ; si nécessaire contactez votre pharmacien.
- Ne pas utiliser ce produit dans les 2 semaines qui suivent un traitement dentaire et/ou orthodontique (plombages, couronnes, implants ...).
- Ne pas s'allonger lors de l'exécution du traitement.
- L'utilisation du produit est déconseillée si vous avez des réactions allergiques à l'un des ingrédients.
- Eviter le contact prolongé avec la peau.
- En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment avec de l'eau.
- Eviter de renverser le produit sur les vêtements.
- Chaque gouttière pré-remplie est conçue pour un usage unique. Les gouttières pré-remplies dont l'emballage est endommagé, ne devraient pas être utilisées.
- Une fois l'emballage ouvert, le produit doit être utilisé dans les 30 minutes.
- Pour des résultats optimaux, éviter la consommation d'aliments et boissons acides comme de la limonade, cola etc. ainsi que le tabac, le café, vin rouge, jus de fruits et autres substances de coloration durant la période de traitement.
- Nous vous recommandons de visiter votre dentiste tous les six mois pour une hygiène bucco-dentaire saine.
- Conserver dans un endroit sec et frais entre 2°C et 25°C hors de la chaleur et de la lumière solaire directe.
- Ne plus utiliser après la date de péremption indiquée sur l'emballage.

AUTRE INFORMATION

Fabricant
Sylphar nv
Xavier De Cocklaan 42, B-9831 Deurle
Belgique
Tel +32 9 321 70 80 - Fax +32 9 321 70 90
www.iwhiteinstant.com

Distributeur
Patch Pharma SA
Avenue Reine Astrid 1
1440 Wauthier-Braine
Belgique
Tel +32 2 367 88 76
Fax +32 2 367 88 69

Ingrédients (INCI): Aqua, Hydrated Silica, Glycerin, Sorbitol, Chondrus Crispus Powder, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Phthalimidoperoxycaproic Acid, Aroma, Citric Acid, Methylparaben, Acrylates/ Acrylamide Copolymer, Paraffinum Liquidum, Xylitol, Monosodium Citrate, Xanthan Gum, PVM/MA Copolymer, Calcium Lactate, Calcium Gluconate, Potassium Acesulfame, Polysorbate 85, BHT, C12-15 Pareth-3.

Contenu :
10 x 0,8 gr